

KUBECZEK MENSTRUACYJNY
YUUKI SOFT, ROZMIAR L (2),
ZESTAW: KUBECZEK + POJEMNIK
DO DEZYNFEKCJI

CENA: 69,99 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

Producent: Yuuki

Kod EAN: 8594169660042



OPIS PRZEDMIOTU

Kubeczek menstruacyjny Yuuki Soft, rozmiar L (2), zestaw: kubeczek + pojemnik do dezynfekcji

Kubeczki menstruacyjne są niesamowitą alternatywą dla pozostałych środków higienicznych: tamponów i podpasek.

Uważamy, że są niekwestionowanym następcą tamponów.

Wysoko cenimy ich ekologię i idącą za tym oszczędność dla budżetu klientek.

Zawartość zestawu:

- kubeczek menstruacyjny Yuuki L (2) model Soft,
- pojemniczek do dezynfekcji w kolorze zielonym,

- opakowanie wraz z instrukcją użytkowania.

Dlaczego warto wybrać Yuuki?

- Kubeczek menstruacyjny Yuuki został **stworzony przez europejską firmę** specjalizującą się w wyrobach medycznych.
- **Silikon medyczny**, z którego wykonano Yuuki, jest certyfikowany i produkowany w kontrolowanych warunkach na terenie Niemiec.
- Jest **ekonomiczny** - jego koszt **zwraca się** całkowicie maksymalnie **po 8 miesiącach** użytkowania.
- Dzięki wielorazowości, Yuuki jest **niesamowicie ekologiczny!** Używając kubeczka menstruacyjnego Yuuki nie produkujesz odpadów sanitarnych, których utylizacja i produkcja zagrażają środowisku.
- Miseczka menstruacyjna Yuuki jest bardzo **komfortowa i praktyczna**.
- Nie musisz się ograniczać: kubeczek **może być używany przy każdej aktywności sportowej**.
- **Nie wywołuje alergii**.
- Kieliszek menstruacyjny Yuuki jest **wytrzymały, gładki, elastyczny, łatwy w użyciu i bezpieczny**.

Kubeczki menstruacyjne Yuuki zostały wykonane z silikonu medycznego - jest to jeden z najlepszych materiałów, z których produkuje się kubeczki menstruacyjne. Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości, **hamuje namnażanie się bakterii oraz ich przywieranie do ścianek kubeczka**. Dzięki temu **łatwo jest go wyczyścić i zdezynfekować** nawet w warunkach domowych. Ponieważ jest hipoalergiczny, **nie podrażnia oraz nie wywołuje alergii**. Ze względu na to, że **nie absorbuje płynów i nie wchodzi w reakcje chemiczne z ciałem**, jest szeroko stosowany w przemyśle medycznym. Jako materiał, silikon medyczny **wytrzymuje wiele lat intensywnego użytkowania** i w tym czasie jego parametry nie ulegają pogorszeniu.

Różnica między Yuuki Classic a Yuuki Soft

Podstawową różnicą pomiędzy Yuuki Classic a Yuuki Soft jest stopień twardości: model Classic jest twardszy od modelu Soft. **Twardsze kubeczki menstruacyjne są polecane kobietom bardziej aktywnym fizycznie, o silniejszych mięśniach dna miednicy**. Szczególnie Panie uprawiające sporty wzmacniające tę grupę mięśni (pilates, pole dance, jogę, jazdę konną) powinny wybierać kubeczki spośród twardszych modeli.

Rozmiary kubeczków menstruacyjnych Yuuki

Oferujemy dwa rozmiary kubeczków menstruacyjnych Yuuki: S (1) oraz L (2). W każdym przypadku **łodyżkę można skrócić samodzielnie** uważając, aby nie uszkodzić kubeczka.

Rozmiar S (1),

to rozmiar odpowiedni dla kobiet, które nie rodziły lub dla kobiet poniżej 28. roku życia:

- średnica: 41 mm
- długość całkowita: 67 mm , długość kubeczka bez łodyżki: 49 mm
- długość łodyżki: 18 mm
- maksymalna pojemność: 24 ml
- pojemność do znacznika bezpieczeństwa: 14 ml, pojemność do otworków odpowietrzających: 17.5 ml

Rozmiar L (2),

to rozmiar odpowiedni dla kobiet, które rodziły lub dla kobiet powyżej 28. roku życia:

- średnica: 46 mm
- długość całkowita: 74 mm, długość kubeczka bez łodyżki: 56 mm
- długość łodyżki: 18 mm
- maks. pojemność: 37 ml
- pojemność do znacznika bezpieczeństwa: 24 ml, pojemność do otworków odpowietrzających: 28 ml

Użytkowanie

Przed aplikacją:

Ponieważ ciało każdej kobiety jest inne, łodyżka kubeczków menstruacyjnych Yuuki powinna zostać przycięta zgodnie z potrzebami użytkowniczki. Przy silnym skracaniu łodyżki należy zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić podstawy kieliszka.

Zaleca się, aby przed każdą menstruacją kubeczek został wygotowany przez ok. 5 minut. Należy zwrócić uwagę, czy ilość wody jest wystarczająca - kubeczek musi być całkowicie zanurzony w wodzie. Taki zabieg nie uszkodzi miseczki menstruacyjnej, za to zapewni jej maksymalną sterylność. Do dezynfekcji można używać również specjalnych preparatów.

Sposób umieszczenia kubeczka w ciele

Przed aplikacją kubeczka należy umyć dłonie i odprężyć się. Zalecaną przy aplikacji pozycją jest pozycja kucająca, ale jej wybór zależy od preferencji kobiety. Równie dobrze może sprawdzić się pozycja siedząca, stojąca z jedną nogą wyżej lub leżąca.

Kubeczek menstruacyjny przed włożeniem należy zwinąć. Ze względu na jego elastyczność, bez problemu powróci w ciele do swojego oryginalnego kształtu. Jest kilka metod zwijania miseczki menstruacyjnej przed aplikacją: w literkę C, w literkę S, w różyczkę. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj. W celu ułatwienia aplikacji można użyć wody lub lubrykantu na bazie wody.

Prawidłowo włożony kubeczek powinien znajdować się ok. centymetr od wejścia do pochwy. Jeżeli nie rozwinie się samoczynnie, poruszaj nim lekko lub dotknij palcem.

Wyciąganie kubeczka:

Zaleca się, aby opróżnianie kubeczka następowało maksymalnie po 8 godzinach od aplikacji. Wyciąganie może odbywać się w tej samej pozycji, co aplikacja. Najpierw należy rozszczelnić kubeczek poprzez złapanie i naciśnięcie jego podstawy. Opróżnij go i wypłucz wodą - jest gotowy do ponownego użycia.