

KUBECZEK MENSTRUACYJNY, KOLOR: TOUCH OF LAVENDER, ROZMIAR L, LADY CUP

CENA: **107,99** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

Producent: Lady Cup

Kod EAN: 8594156951122



OPIS PRZEDMIOTU

Kubeczek menstruacyjny, kolor: Touch of Lavender, rozmiar L, Lady Cup

Gdybyśmy mieli opisać ten produkt jedynie w przymiotnikach, to wybralibyśmy te:

Bezpieczny - Nowoczesny - Prosty - Ekologiczny - Wygodny - Ekonomiczny - Higieniczny

Mając na uwadze wyjątkowe potrzeby kobiet, Lady Cup stworzyło kubeczek menstruacyjny dostosowany do nich.

Producenci wzięli pod uwagę całe spektrum kobiecych wymagań - tak powstał świetny kubeczek menstruacyjny Lady Cup. Oto jego niewątpliwe zalety:

- kubeczek menstruacyjny Lady Cup **jest całkowicie bezpieczny** - otrzymał wyróżnienie Czeskiego Instytutu Zdrowia Publicznego
- ten kieliszek menstruacyjny łączy w sobie wygodę stosowania tamponów z najnowocześniejszym, **atestowanym silikonem medycznym wysokiej jakości**, który otrzymał certyfikat bezpieczeństwa Unii Europejskiej
- ponieważ **medyczny silikon nie uczula, nie absorbuje płynów i nie wchodzi w reakcje chemiczne z ciałem**, jest stosowany nie tylko w przemyśle medycznym, ale także spożywczym
- nowoczesna, wielorazowa miseczka menstruacyjna Lady Cup jest **wspaniałą alternatywą dla tamponów i podpasek**
- Lady Cup jest **wytrzymały, gładki, elastyczny, łatwy w użyciu i bezpieczny**
- kubeczek **produkowany jest w ściśle kontrolowanych, sterylnych warunkach**

- przy odpowiedniej trosce, **żywołność kubeczka to nawet 15 lat**; w związku z tym jego posiadanie jest nie tylko **ekologicznym wyborem**, ale także dobrą inwestycją i **oszczędnością dla budżetu domowego**
- wartość miseczki menstruacyjnej zwraca się średnio już **po 4 miesiącach**

Jak stosować kubeczek menstruacyjny?

Przed pierwszym użyciem zaleca się dezynfekcję kubeczka. Do dezynfekcji wystarczy użyć wody, np. gotować kubeczek przez 5 minut. Nie zaszkodzi to jego strukturze i właściwościom. **Kubeczka menstruacyjnego mogą używać kobiety w każdym wieku**: zarówno młode, które jeszcze nie współżyły, jak i panie stosujące antykoncepcję czy mamy. Zalecamy zapoznanie się z ulotką dołączoną do opakowania przez użyciem.

Aplikacja

Przed aplikacją pamiętajmy o dezynfekcji kubeczka, umyciu dłoni i odprężeniu. Do aplikacji **można użyć lubrykantu na bazie wody**. Jest to szczególnie polecane młodym Paniom. Najlepszymi pozycjami do umieszczenia kubeczka są pozycja stojąca i siedząca. Ich wybór zależy od osobistych preferencji i budowy ciała. **Wprowadzenie kubeczka menstruacyjnego do wnętrza ciała ułatwia złożenie go wzdłuż na połowę**. Prawidłowa aplikacja spowoduje, że kubeczek sam ułoży się wewnątrz pochwy.

Czy kubeczek menstruacyjny jest dobrze umieszczony?

Najlepszym sposobem na sprawdzenie, czy aplikacja została przeprowadzona prawidłowo, jest spróbowanie delikatnego obrócenia kubeczka łapiąc dolną jego część. **Jeżeli miseczka menstruacyjna umieszczona jest prawidłowo, to nie będzie się obracać**. Jest to zasługa mięśni pochwy, które będą ją utrzymywać w odpowiedniej pozycji i zapobiegną przeciekaniu. Umieszczony kubeczek menstruacyjny w ciele kobiety jest umiejscowiony niżej niż tampon, co nie powinno niepokoić.

Stosowanie

Kubeczek menstruacyjny Lady Cup, w zależności od rozmiaru, jest w stanie utrzymać 15,5–21,2/26–34,3 ml krwi menstruacyjnej. Dzięki swojej konstrukcji, **sprawdza się zarówno przy aktywnym wypoczynku**, jak uprawianie sportu, **jak i spokojnym**, np.: czytanie książek i spacerowanie. Jest **idealny do codziennego użytku** w czasie menstruacji, **także w nocy**. Najlepiej opróżniać Lady Cup 2-5 razy na dobę w zależności od intensywności krwawienia, nie dłużej niż 12 godzin na dobę.

Wymywanie, opróżnianie, czyszczenie

Specjalny silikon medyczny, z którego wykonany został kubeczek, powoduje, że **wystarczy do przepłukać wodą**, aby był czysty. **Bakterie nie są w stanie utrzymać się na jego gładkiej powierzchni**. Można go także wygotować lub oczyścić w specjalnym roztworze - wybór należy do użytkowniczki.

Jak dbać o Lady Cup?

Najlepszym sposobem jest dezynfekcja kubeczka i pozostawienie go w miejscu z dostępem do powietrza, ale bez dostępu promieni UV, które z czasem mogą zmienić jego kolor. Aby to ułatwić swoim Klientkom, producent dołącza do opakowania stylowe, bawełniane woreczki. Dzięki nim kubeczek menstruacyjny będzie chroniony przed słońcem.

Rozmiary

Oferujemy dwa rozmiary kubeczków menstruacyjnych Lady Cup: S oraz L. W każdym przypadku **uchwyt można skrócić samodzielnie** uważając, aby nie uszkodzić kubeczka.

Rozmiar S (Small), to rozmiar odpowiedni dla kobiet, które nie rodziły lub dla kobiet poniżej 25. roku życia:

- średnica: 40 mm
- długość: 46 mm
- długość uchwytu: 19 mm
- maks. pojemność: 21,2 ml

Rozmiar L (Large), to rozmiar odpowiedni dla kobiet, które rodziły lub dla kobiet powyżej 25. roku życia:

- średnica: 46 mm
- długość: 53 mm
- długość uchwytu: 13 mm
- maks. pojemność: 34,3 ml

